

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИМІРЯТИ РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ ГЛЮКОМЕТРОМ IXELL®PRO?




Зніміть захисну плівку з кришки флакона з тест-смужками. При першому відкритті флакона напишіть на етикетці дату.




Ретельно вимийте та висушіть руки. Витягніть тест-смужку і щільно закрийте флакон.




Вставте тест-смужку, щоб увімкнути глюкометр. Послідовність, у якій символи відображаються на дисплеї, виглядає наступним чином: „СНК” і блимаючий символ „”.



Правильно зробить прокол (відповідно до інструкції на попередній сторінці).

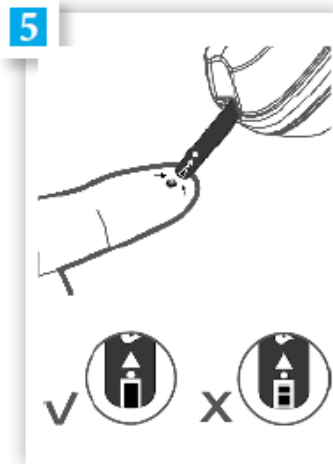

Коли на дисплеї блимає символ „”, утримуйте його і торкніться краплі крові абсорбуючим отвором тест-смужки, доки вікно підтвердження повністю не заповниться.



Після того, як глюкометр почне зворотний відлік до 0, результат вашого тесту з'явиться разом із датою та часом виконання тесту та буде автоматично збережено в пам'яті.



Вручну вийміть тест-смужку з гнізда глюкометра і викиньте її. Глюкометр автоматично вимкнеться, коли ви витягнете тест-смужку.