


ETUI TERMICZNE SMART CASE

Jak działa Etui Smart Case?

Etui termiczne Smart Case zostało stworzone, aby umożliwić **użytkowanie i przechowywanie w bezpiecznych warunkach m.in. insuliny w fiolkach, PEN'ów insulinowych, pasków do pomiaru glukozy.**

Etui termiczne Smart Case wyposażone jest w sondę, która w sposób ciągły mierzy temperaturę wewnątrz etui i wyświetla jej wartość na wyświetlaczu LCD.

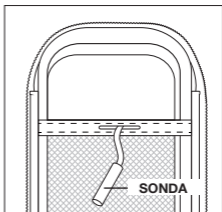

Po umieszczeniu, dedykowanego do etui, zamrożonego/schłodzonego wkładu żelowego w Etui Smart Case obniżona temperatura utrzymuje się ok. 6-7 godzin.

Wymiana baterii

W celu wymiany baterii należy wyciągnąć termometr z obudowy etui. Aby to wykonać należy podważyć zewnętrzną ramkę termometru i pociągnąć do siebie.

Termometr posiada dwa zatrzaskowe klipsy, które unieruchamiają termometr w etui. Przewodu wraz z sondą nie należy wyjmować z wnętrza etui.

W celu wymiany baterii należy otworzyć pokrywę baterii z tyłu termometru, wyjąć 2 baterie i umieścić w tym samym miejscu 2 nowe baterie typ LR 44, a następnie zamknąć pokrywę.

Wsunąć termometr w otwór etui skąd wcześniej został wyjęty termometr.



Uwaga:

- Nie należy wyrzucać starych urządzeń elektronicznych i zużytych baterii w ramach odpadów komunalnych. Zużyte baterie można oddać w miejskim punkcie zbiórki lub w lokalnym sklepie oferującym elektronikę.
- Nie umieszczać wyświetlacza w pobliżu wysokich temperatur.
- Prosimy nie próbować naprawiać urządzenia.

Specyfikacja techniczna termometru:

Zakres temperatury: -50°C $+110^{\circ}\text{C}$
Rozdzielczość wyświetlacza: 0,1C
Dokładność pomiaru: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
Zasilanie: 2 x bateria LR44
Materiał sondy: stal nierdzewna
Długość przewodu: 27 cm
Średnica sondy: 4 mm
Wymiary termometru:
4,75 x 2,8 x 1,5 cm

Wymiary etui na insulinę:

Rozmiar zewnętrzny, wliczając zamek błyskawiczny:
21,8 x 11,2 x 5,4 cm
Rozmiar wewnętrzny:
20,3 x 9,3 x 4 cm



GENEXO

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Genexo sp. z o.o., ul. Gen Zajączka 26, 01-510 Warszawa, www.genexo.pl

INFOLINIA GENEXO - ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Infolinia Genexo czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
801 808 818 lub +48 516 203 516

(całkowity koszt połączenia w cenie 1 impulsu wg taryfy operatora)